

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Nehmen Sie die Maske aus der Schachtel und klappen Sie sie durch Ziehen an den Bändern auf.
2. Setzen Sie die Maske mit der Nasendichtung nach oben auf Ihr Gesicht.
3. Dehnen Sie die Bänder und legen Sie sie auf Ihre Ohren.
4. Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und drücken Sie die Nasendichtung um die Nase, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.

ANWENDUNG

1. Das Produkt soll vor Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 0,075 Mikrometern schützen, wie z. B. Staub, der bei technischen Prozessen während der Reinigung entsteht, nichtflüchtigen Flüssigkeiten und Gemischen fester und flüssiger Verunreinigungen, die unter schlechten Umgebungsbedingungen gefunden werden (Smog).
2. Das Produkt ist nicht zum Schutz vor schädlichen Gasen oder Dämpfen, Aerosolen auf Ölbasis, Asbest, Cadmium, Blei, Aminverbindungen und während Sandstrahlprozessen bestimmt. Das Produkt ist nicht zur Verwendung an Orten vorgesehen, an denen die Schadstoffkonzentration das Zehnfache der in den geltenden Vorschriften angegebenen zulässigen Konzentration überschreitet. Das Produkt bietet keine zusätzliche Sauerstoffversorgung.

WARNHINWEISE

1. Wenn die Maske beschädigt, verschmutzt oder schwer zu atmen ist, verlassen Sie den gefährdeten Bereich und ersetzen Sie die Maske durch eine neue.
2. Das Produkt sollte an einem trockenen und kühlen Ort ohne Zugang zu aggressiven Gasen und einer Luftfeuchtigkeit von unter 80% gelagert werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten. Das Produkt sollte nicht von Personen mit Atemproblemen oder eingeschränkter Lungenkapazität verwendet werden. Das Produkt darf nicht im Schlaf verwendet werden.
4. Die Verwendung des Produkts in einer Weise, die nicht den Gebrauchsanweisungen entspricht, kann ein Risiko für die Gesundheit oder das Leben darstellen.
5. Das Produkt darf nicht gereinigt, gewaschen, wiederverwendet oder zusammen mit anderen Personen verwendet werden.

Importeur

SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6
34466 Wolfhagen
DEUTSCHLAND

  2834